

Eumill®

DRYREPAIR®

SECCHENZA OCULARE

Acido ialuronico reticolato 0,4% con urea
Gocce oculari lubrificanti, idratanti e riparatrici
Flacone pluridose da 10 ml senza conservanti

Eumill DRYREPAIR è una soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico a base di acido ialuronico reticolato con urea, secondo una tecnologia brevettata, così da aumentare e migliorare le naturali proprietà meccaniche dell'acido ialuronico, rendendolo in grado di resistere più a lungo alla degradazione da parte delle ialuronidasi rispetto all'acido ialuronico naturale.

La struttura reticolata che l'acido ialuronico forma offre idratazione ed è in grado di trattenere a lungo le molecole di acqua in modo da migliorare le intrinseche proprietà lubrificanti dell'acido ialuronico mentre, aumentando al contempo la sua azione idratante è indicato come adiuvante nella sindrome dell'occhio secco.

L'acido ialuronico reticolato è inoltre efficace nel contrastare radicali liberi e nell'esercitare un'azione riepitelizzante per una maggiore protezione della superficie corneale.

L'acido ialuronico reticolato conferisce al prodotto proprietà lubrificanti, idratanti e riparatrici; è inoltre in grado di alleviare la secchezza oculare dovuta alla sindrome dell'occhio secco e donare sollievo in caso di stanchezza o irritazione oculare determinata da processi infiammatori o condizioni ambientali.

Eumill DRYREPAIR allevia rossore, secchezza, fatica e discomfort oculare causati da sindrome dell'occhio secco, fattori ambientali come vento, fumo, inquinamento, prolungata esposizione alla luce solare, salsedine, acqua di mare o piscina, studio o lavoro intensi, prolungato utilizzo del computer, lunghi periodi di guida, problematiche di lacrimazione generate da processi infiammatori, chirurgia oculare o chirurgia estetica palpebrale e blefariti croniche. Idrata e lubrifica la cornea e la congiuntiva in caso di secchezza oculare dovuta all'uso di lenti a contatto. Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno.

Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria o vaso-costrittrici.

INDICAZIONI D'USO

Eumill DRYREPAIR è indicato per:

- Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco;
- In seguito a chirurgia refrattiva;
- Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, fatica e discomfort oculare o della mucosa oculare dovuti a:
 - fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine);
 - secchezza oculare in seguito ad eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi;
 - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione e blefariti croniche;
 - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare di varia natura o chirurgia estetica palpebrale;
 - utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0,4%), Trometamolo, Acido Cloridrico 2N, Sodio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare accuratamente le mani;



1 Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia.



2 Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione.



3 Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sul flacone per instillare 2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto.



4 Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone con l'apposito tappo.

Per le caratteristiche del flacone con sistema pluridose senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone stesso, potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.

Dopo la prima apertura, il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è utilizzabile esclusivamente da un solo paziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Per la sua caratteristica viscosità, subito dopo l'instillazione si può verificare una visione leggermente offuscata che scompare rapidamente.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

La confezione è composta da un flacone pluridose con sistema di chiusura OSD (ophthalmic squeeze dispenser) contenente 10 ml di prodotto privo di conservanti.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 30°C in un luogo asciutto, lontano dal calore, evitando l'esposizione diretta al sole.

Il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta.



Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. – Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano

Data di revisione: 03/2021



DISPOSITIVO MEDICO  0425



4724 D

018681

Eumill®

DRYREPAIR®

SECCHENZA OCULARE

Acido ialuronico reticolato 0,4% con urea
Gocce oculari lubrificanti, idratanti e riparatrici
10 monodose da 0,5 ml senza conservanti

Eumill DRYREPAIR è una soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico a base di acido ialuronico reticolato con urea, secondo una tecnologia brevettata, così da aumentare e migliorare le naturali proprietà meccaniche dell'acido ialuronico, rendendolo in grado di resistere più a lungo alla degradazione da parte delle ialuronidasi rispetto all'acido ialuronico naturale.

La struttura reticolata che l'acido ialuronico forma offre idratazione ed è in grado di trattenere a lungo le molecole di acqua in modo da migliorare le intrinseche proprietà lubrificanti dell'acido ialuronico mentre, aumentando al contempo la sua azione idratante è indicato come adiuvante nella sindrome dell'occhio secco.

L'acido ialuronico reticolato è inoltre efficace nel contrastare radicali liberi e nell'esercitare un'azione ripielitizzante per una maggiore protezione della superficie corneale.

L'acido ialuronico reticolato conferisce al prodotto proprietà lubrificanti, idratanti e riparatrici; è inoltre in grado di alleviare la secchezza oculare dovuta alla sindrome dell'occhio secco e donare sollievo in caso di stanchezza o irritazione oculare determinata da processi infiammatori o condizioni ambientali.

Eumill DRYREPAIR allevia rossore, secchezza, fatica e discomfort oculare causati da sindrome dell'occhio secco, fattori ambientali come vento, fumo, inquinamento, prolungata esposizione alla luce solare, salsedine, acqua di mare o piscina, studio o lavoro intensi, prolungato utilizzo del computer, lunghi periodi di guida, problematiche di lacrimazione generate da processi infiammatori, chirurgia oculare o chirurgia estetica palpebrale e blefariti croniche. Idrata e lubrifica la cornea e la congiuntiva in caso di secchezza oculare dovuta all'uso di lenti a contatto. Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. **È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno.**

Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria o vaso-costrittrice.

INDICAZIONI D'USO

Eumill DRYREPAIR è indicato per:

- Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco;
- In seguito a chirurgia refrattiva;
- Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, fatica e discomfort oculare o della mucosa oculare dovuti a:
 - fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine);
 - secchezza oculare in seguito ad eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi;
 - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione e blefariti croniche;
 - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare di varia natura o chirurgia estetica palpebrale;
 - utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide.


COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0.4%), Trometamolo, Acido Cloridrico 2N, Sodio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili. **Non contiene conservanti.**


ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare accuratamente le mani.

Dopo aver aperto la busta di protezione:

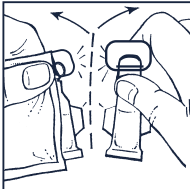


1. Separare un flaconcino monodose dalla barretta costituita da 5 contenitori.

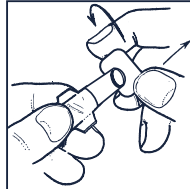

2. Ruotare l'aletta ed estrarre il cappuccio di chiusura che può essere utilizzato per richiudere il contenitore.



3. Effettuare una leggera pressione sul corpo del flaconcino monodose ed instillare 2/3 gocce in ciascun occhio ogni qualvolta necessario.

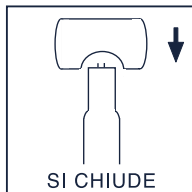

4. Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Il prodotto è utilizzabile soltanto da una persona.
- Il prodotto è soltanto per uso oftalmico.
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio dovesse essere danneggiata oppure se il flaconcino monodose risultasse non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione, non toccare l'occhio e nessun'altra superficie con la punta del monodose.
- Per la sua caratteristica viscosità, subito dopo l'instillazione si può verificare una visione leggermente offuscata che scompare rapidamente.
- Controindicato in soggetti con problemi di ipersensibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di problemi durante il trattamento, interromperne l'uso e consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose.
- Smaltire i flaconcini utilizzati in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

CONFEZIONAMENTO

Confezione contenente 2 bustine da 5 monodose ciascuna. Contenitore monodose da 0,5 ml **richiudibile** equivalente a circa 10 gocce.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare fra 2° e 30°C in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce solare.

Il contenuto del monodose può essere utilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

Conservare gli altri flaconcini monodose nella confezione originale in alluminio fino al momento dell'uso.

VALIDITÀ

A confezionamento chiuso, non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose.



Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. – Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano

Data di revisione: 03/2021



STERILE A

DISPOSITIVO MEDICO **CE** 0425

RECORDATI OTC

5248 C

018720